

	INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE	IU 01
		Pag.1/1
	MASCĂ FACIALA DE UZ MEDICAL TIP IIR	Versiunea I

1. Măștile faciale de uz medical tip IIR sunt destinate în principal utilizării de către profesioniștii din domeniul medical, în sala de operație sau alte incinte medicale cu cerințe similare. Pot proteja pacientul împotriva agenților infecțioși și în plus, în anumite situații, pot proteja purtătorul măștii împotriva stropirii cu lichide potențial contaminate. Măștile faciale de uz medical pot fi destinate să fie purtate, de asemenea, de către pacienți, de către alte persoane pentru a se reduce riscul de răspândire a infecțiilor, precum și de către utilizatori neprofesionali în special în situații epidemice sau pandemice.
2. Înainte de manipularea măștii, mâinile trebuie să fie spălate cu apă și săpun și/sau cu un dezinfectant de mâini pe bază de alcool.
3. Se are în vedere ca suportul nazal să fie poziționat în partea de sus și partea colorată în exterior.
4. Se apucă masca de șnururile elastice, se fixează peste gura și nas, petrecând cele două șnuri în spatele urechilor. Masca va fi întinsă și așezată confortabil, astfel încât să acopere nasul, gura și bărbia.



5. Se apasă suportul nazal la rădăcina nasului și se ajustează pentru a asigura poziția corectă și sigură a măștii.
6. Se va evita atingerea măștii în timpul utilizării.
7. Masca nu va fi îndepărtată atunci când utilizatorul tusește sau strănută.
8. Masca va fi purtată maximum 4 ore. În cazul în care masca s-a umezit, s-a murdărit, s-a deteriorat sau dacă obturează respirația, va fi înlocuită și înainte de intervalul celor 4 ore.
9. Pentru scoaterea măștii, se va proceda astfel: se vor spăla mâinile cu apă și săpun sau se vor dezinfecta cu soluție pe bază de alcool. Se desfac/ se eliberează benzile elastice. Se scoate masca în direcție anterioară, îndepărtând-o de pe față. Se aruncă masca într-un container de gunoi cu capac acționat prin pedală. În lipsa acestuia, masca folosită trebuie introdusă într-o pungă de plastic, care trebuie să fie apoi securizată printr-o închidere corespunzătoare. Punga securizată poate fi pusă în gunoiul menajer. Măștile de unică folosință trebuie aruncate după o singură utilizare.
10. După îndepărtarea măștii de pe față, mâinile trebuie să fie curățate prin spălare cu apă și săpun sau cu un dezinfectant pentru mâini, pe bază de alcool.
11. Masca va fi purtată în medii uscate.
12. Masca folosită reprezintă un risc pentru sănătatea utilizatorului și a altor persoane, motiv pentru care este interzisă reutilizarea.