

## Oxivir® Excel™ Wipe CE

Șervețele dezinfectante și de curățare, gata de utilizare, cu spectru larg de acțiune, pentru dispozitive medicale și suprafețe dure neporoase



### Descriere

Diversey Care Oxivir Excel Wipe CE este un șervețel dezinfectant și de curățare, într-un singur pas, cu spectru larg și timpi scurți de contact. Bazat pe tehnologia brevetată a Diversey Care cu formulă acidă pe bază de peroxid de hidrogen, Oxivir Excel Wipe poate fi utilizat pe suprafețele dure, neporoase ale dispozitivelor medicale neinvazive.

### Proprietăți de bază

- Bactericid, virucid, levuricid
- Dezinfectează în mai puțin de 1 minut
- Profil pozitiv de siguranță pentru utilizator și suprafețe
- Comod, nu necesită pregătire sau spălare
- Curățare eficientă
- Nu conține parfum
- Se descompune în apă și oxigen
- Nu este necesară clătirea



### Avantaje

- Eficacitatea cu spectru larg asigură cele mai ridicate nivele de protecție a pacientului. Testat extensiv conform standardelor europene și eficace împotriva mai multor agenți patogeni, este declarat a fi complet virucid inclusiv împotriva Poliovirus, *Adenovirus* și *Murine norovirus*, considerat eficace împotriva tuturor virusurilor cu anvelopă precum: HIV, HBV, HCV, Virusul gripal, virusul *Vaccinia* și Coronavirus.
- Timpii scurți de contact păstrează suprafața umedă asigurând astfel eficacitatea dezinfectării
- Performanță de curățare excelentă
- Sigur de utilizat atât pentru pacienți, cât și pentru vizitatori, nu este iritant pentru ochi și piele
- Formula AHP este delicată cu suprafețele, prelungind durata de viață a echipamentelor
- Soluția este simplă și ușor de utilizat și elimină erorile legate de diluție
- Nu există riscul contaminării încrucișate grație șervețelilor de unică folosință
- Potrivit pentru utilizare în zone de risc din domeniul medical, inclusiv săli de operații, unități de terapie intensivă, unități de terapie intensivă neonatală și saloanele pacienților

### Instrucțiuni de utilizare Aplicare

1. Îndepărtați murdăria grosieră.
2. Deschideți pachetul de șervețele, scoateți un singur șervețel și închideți capacul
3. Ștergeți suprafața asigurându-vă că este umezită în întregime, lăsați să se usuce
4. Asigurați-vă că suprafețele rămân ude pe durata timpului de contact
5. Schimbați șervețelul atunci când nu mai umezește suprafața, când este vizibil murdar sau când treceți la o altă zonă de curățat

**Important:** A nu se amesteca cu alte produse. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la apă sau acid.

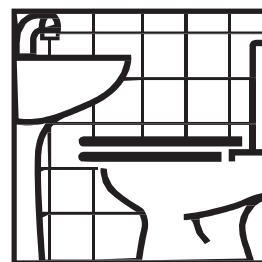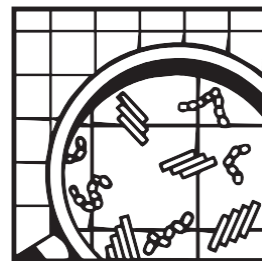

## Oxivir® Excel™ Wipe CE

Șervețele dezinfectante și de curățare, gata de utilizare, cu spectru larg de acțiune, pentru dispozitive medicale și suprafețe dure neporoase

### Date tehnice

Aspect:	șervețel din polipropilenă
Densitate relativă [20 °C]:	1,000
pH - la utilizare:	1,95
Punct de aprindere:	N/A
Termen de valabilitate:	720 zile
Parfum:	neutru

*Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații.*

### Informații despre manipulare și depozitare în condiții siguranță

Informații complete referitoare la manevrarea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat. A se păstra în recipientul original. A se evita temperaturile extreme. Reacționează în contact cu substanțele oxidabile.

### Compatibilitatea produsului

În condițiile recomandate de utilizare, Oxivir Excel Wipe CE de la Diversey este adecvat pentru majoritatea materialelor uzuale.

### Informații ecologice

Surfactanții utilizați în compoziția acestui produs îndeplinesc cerințele de biodegradabilitate finală în conformitate cu Regulamentul UE privind detergenții, CE 648/2004.

### Date microbiologice

Eficacitate dovedită prin conformitatea cu: EN13727, EN13624, EN14476.

Declarație		Timp de contact
<i>Bactericid</i>	RTU (gata de utilizare)	5 min
<i>Levuricid</i>	RTU (gata de utilizare)	5 min
<i>Virucid</i>	RTU (gata de utilizare)	30 sec